



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ TRELAX® НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ
РУ №ФСР 2009/04590

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	1
2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	2
3. ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ.....	2
4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	2
5. ПРЕИМУЩЕСТВА МАТРАЦЕВ.....	2
6. СПОСОБ ПОДБОРА.....	3
7. СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К КРЕСЛУ.....	3
8. СОСТАВ.....	4
9. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	4
10. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.....	4
11. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ.....	5
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	6
13. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	6
14. СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	6
15. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	7
16. РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX®	8

МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ TRELAX® НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ (МОДЕЛИ «КЛАССИК» И «ЛЮКС») ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТА АВТОМОБИЛЬНЫХ КРЕСЕЛ, ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОХОНДРОЗА, РАДИКУЛИТА, БОЛЕЙ И ТЯЖЕСТИ В СПИНЕ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ.

ЗА СЧЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ В ВИДЕ ПОЛИМЕРНЫХ ШАРИКОВ МАТРАЦ НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ И НОРМАЛИЗУЕТ ТОНУС МЫШЦ, ЧТО ДЕЛАЕТ ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ БОЛЕЕ ПРИЯТНЫМ И КОМФОРТНЫМ.



Наименование	Артикул	Размер, см
Классик	МА50/100	50x100
Люкс	МА50/110	50x110

Показания к применению

- ☰ Профилактика возникновения болей в спине и пояснице во время вождения автомобиля, особенно на неровной дороге.
- ☰ Предупреждение обострений хронического радикулита и остеохондроза позвоночника у водителей и пассажиров.
- ☰ Дискомфорт в области поясницы, крестца и бёдер, возникающий при длительном вождении автомобиля.
- ☰ Мышечное напряжение в области спины во время сидения за рулём.
- ☰ Дисбаланс и перенапряжение мышц спины.

Лечебные эффекты

- ☰ Обеспечение физиологически выгодного положения позвоночника во время вождения автомобиля.
- ☰ Массажный эффект при использовании матраца.
- ☰ Устранение повышенного тонуса мышц позвоночника.
- ☰ Разгрузка мышц спины.
- ☰ Эффективное устранение микровибраций, вызывающих развитие поражений позвоночника у водителей.

Ограничения и противопоказания к применению

Абсолютных противопоказаний к применению матраца нет. При заболеваниях костно-мышечной системы перед началом использования матраца необходимо проконсультироваться с врачом.

Преимущества матрацев TRELAX®

- ☰ Оптимизированный шаг «волны» матраца, обеспечивающий гарантированный профилактический и лечебный эффект изделия.
- ☰ Оптимальная толщина матраца, обеспечивающая комфорт при использовании на любых типах автомобильных кресел.
- ☰ Лучшее сочетание верха (оболочки) и наполнителя матраца для удобства водителей и пассажиров.
- ☰ Воздухопроницаемость матраца.
- ☰ Гипоаллергенность материалов матраца.
- ☰ Индивидуальная упаковка, удобная для транспортировки и хранения.

Способ подбора



Рис. 1


КЛАССИК (рис.1) для кресел с высотой спинки 50-55 см. Матрац КЛАССИК подходит как для кресел с боковой поддержкой, так и без нее, с отделенным подголовником.




Рис. 2

ЛЮКС (рис.2) для кресел с высотой спинки от 60 см. Матрац ЛЮКС рекомендуется для удлиненных кресел, зауженных сверху, имеющих ярко выраженные боковые валики. Также матрац подходит для кресел, на которые надет чехол, захватывающий подголовник.


Схема крепления к креслу

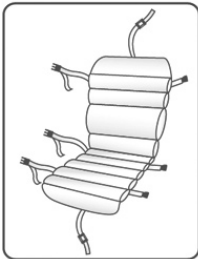

Ортопедическое автомобильное сиденье TRELAX®

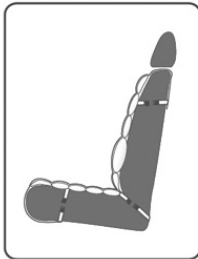

Крепление (вид сбоку)

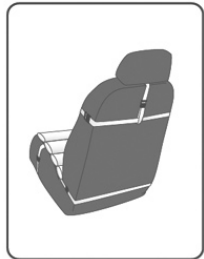

Крепление (вид сзади)

Состав

Оболочка: 100% полиэстер.

Прослойка: 100% полиуретан.

Наполнитель: 100% пенополистирол.

Комплектность

Матрац, упаковка из ПВХ, вкладыш, инструкция по применению.

Уход за изделием




- ☹ Матрац не рекомендуется стирать в домашних условиях в связи с долгой сушкой.
- ☹ Для стирки матраца необходимо использовать профессиональную мокрую чистку (аквачистка). Рекомендуется деликатный режим чистки с использованием барабанной сушки при температуре не выше 50°C.
- ☹ Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.
- ☹ Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- ☹ Утюжка запрещена.



Характеристика материалов


Матрацы TRELAX® состоят из трех видов материалов:

Оболочка — ткань автотвид, прослойка — нетканое объемное термо-скрепленное полотно из полых волокон и наполнитель в виде шариков пенополистирола.

-  **Ткань автотвид** широко используется в автомобильной промышленности для производства автокресел и внутренней обивки салона. Автотвид обладает высокой прочностью и износостойкостью.
-  **Пенополиуретан** обладает высоким коэффициентом восстанавливаемости и формоустойчивости. Смягчает давление шариков на тело и способствует поддержанию температурного режима.
-  **Шарики пенополистирола** являются уникальным полимерным материалом. Диаметр шариков составляет 8-10 мм. Шарики оказывают массажное воздействие, сохраняют температурный баланс и способствуют снятию напряжения с мышц спины и поясницы.

Все шарики пенополистирола обрабатываются специальным силиконовым раствором для обеспечения антистатических свойств и сохранения формы матраца.



-  Сочетание всех свойств материалов в матрацах TRELAX® обеспечивает уменьшение нагрузки на позвоночник во время вождения автомобиля.

Гарантийные обязательства

- ☰ Гарантийный срок на матрац: 2 года со дня продажи.
- ☰ Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства матраца.
- ☰ Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.
- ☰ В случае выявления специфического запаха при вскрытии упаковки необходимо проветрить матрац на свежем воздухе.
- ☰ Матрац необходимо встряхивать не менее 1 раза в неделю для восстановления шариков.
- ☰ Периодическое встряхивание позволяет шарикам пенополистирола восстановиться, но не более чем на 90 % от первоначального размера.
- ☰ В период использования матрац может просесть в местах наибольшей нагрузки, общий объем шариков уменьшается. При этом шарики продолжают выполнять свою функцию.
- ☰ При эксплуатации матрац может увеличиться по длине на 3-4 см.
- ☰ Срок службы: не менее 2-х лет.
- ☰ При использовании матраца свыше срока службы возможна деформация формы и снижение лечебного эффекта.
- ☰ Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование матраца на автомобильное сиденье.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.

Матрац ортопедический TRELAX® ТУ № 9396-002-88419706-2008
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ24.В02488



Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ
РУ №ФСР 2009/04590



Конструкция матраца запатентована. Патент № 55579.



Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД СПИНУ TRELAX® SPECTRA

предназначена для повышения комфортности обычных кресел, стульев и автомобильных сидений.

Подушка SPECTRA мягко поддерживает поясницу и компенсирует нагрузки на нижний грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника, возникающие при длительном сидении на работе, на учебе и во время вождения автомобиля.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ TRELAX® DIVA

предназначена для использования во время отдыха в автомобиле, самолете, поезде, дома и в офисе. Подушка разгружает мышцы шейно-воротниковой зоны, позволяет сохранить бодрость и хорошее самочувствие, поддерживает оптимальное положение шеи.

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ TRELAX® RESPECTA

предназначена для полноценного отдыха подростков и взрослых. Технология памяти формы, реализованная в изделии, позволяет избежать негативного эффекта привыкания к подушке и с первого дня почувствовать высокую степень комфорта и профилактический эффект. Подушки под голову успешно используют для профилактики остеохондроза, головных болей, при повышенном тонусе мышц шеи и спины, в комплексе реабилитационных мер после травм шейного отдела позвоночника.



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАЦЫ TRELAX®

предназначены для сна и дневного отдыха, устранения дискомфорта в постели, предупреждения развития и лечения заболеваний позвоночника (сколиозов, радикулитов, остеохондрозов, спондилоартритов, болевых ощущений в области спины). Ежедневный отдых и сон на ортопедическом матрасе помогает снять утомление мышц спины, обеспечивает максимальный отдых и мягкий массаж всего тела во время ночного сна.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ



Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.
www.trelaxorto.ru

Дата изготовления и упаковывания:

Арт. INTTC-MA-N2