



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДУШКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
И КОРМЯЩИХ МАМ
TRELAX® BANANA



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	1
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	2
3. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДУШКИ.....	2
4. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДУШКИ TRELAX BANANA.....	4
5. СОСТАВ.....	4
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	4
7. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.....	4
8. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ.....	5
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	6
10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	6
11. СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	6
10. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	6
12. РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX.....	8

Подушка TRELAX BANANA предназначена для применения во время беременности и в период кормления ребенка. Использование подушки облегчает кормление младенца и уход за ним, помогает поддерживать правильную осанку, снимает нагрузку с пояса верхних конечностей, поясницы и крестца, возникающую во время беременности, в период кормления и ухода за маленькими детьми.



Наименование	Артикул	Размер, см
BANANA	П23	26x135

Область применения

- ☉ Во время беременности для обеспечения комфортного положения тела, поясницы, ног, живота в положении лежа или сидя.
- ☉ Во время кормления ребенка (особенно в положении лежа) для снятия напряжения с пояса верхних конечностей, грудного отдела позвоночника и шеи.
- ☉ Для предотвращения падения или смещения ребенка во сне или при лежании вне детской кроватки.

Способы применения подушки

1

Расположение подушки во время беременности



2

Расположение подушки
во время кормления,
укачивания и сна
младенца



3

Расположение подушки
для фиксации ребенка



Преимущества подушки TRELAX BANANA

- Конструкция подушки позволяет использовать ее для беременных, кормящих мам и младенцев.
- Анатомическая форма позволяет оптимально поддерживать грудной и поясничный отделы позвоночника, пояс верхних конечностей и шею.
- Конструкция подушки обеспечивает максимальную площадь опоры.
- Наполнитель подушки позволяет изменять толщину отдельных частей подушки и удобно размещать на подушке ребенка или размещаться женщине.
- Материалы чехла и наполнителя подушки не препятствуют кожному дыханию.
- Структура подушки обеспечивает и поддерживает оптимальный температурный баланс кожи.
- Легкость ухода за подушкой (подушка легко стирается в домашних условиях).

Состав

Чехол: 100% хлопок.

Наполнитель: 100% пенополистирол (полимерные шарики).

Наволочка: 100% хлопок.

Комплектность

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовая сумка, инструкция по применению.

Уход за изделием

Уход за наволочкой:

- Наволочку, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим).
- Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- Сушить в естественных условиях.
- Утюжка при температуре 110°C.




Уход за подушкой в чехле:

- ☰ Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 40°C.
- ☰ Осторожно отжать руками, не выкручивать. Рекомендуется естественная вертикальная сушка.
- ☰ Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.
- ☰ Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- ☰ Утюжка запрещена.



Характеристика материалов

- ☰ Наполнитель подушки — шарики пенополистирола являются уникальным полимерным материалом. Диаметр шариков составляет 3-5 мм. Равномерно распределяясь в чехле, шарики обеспечивают надежную поддержку, сохраняют температурный баланс.
- ☰ Чехол подушки выполнен из хлопчатобумажной ткани.
- ☰ Для изготовления наволочки используется трикотажная хлопчатобумажная ткань, рекомендованная для производства нательной одежды для детей.

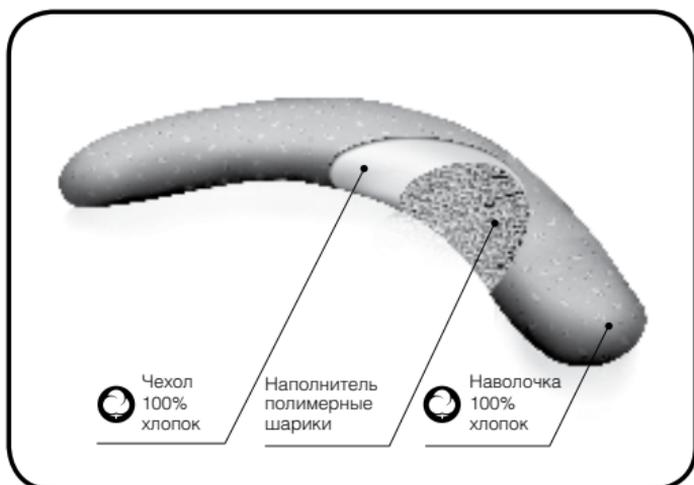

Гарантийные обязательства

- ☰ Гарантийный срок на подушку — 1 год со дня продажи.
- ☰ Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.
- ☰ Во время эксплуатации возможно проминание шариков наполнителя на 20-35% от исходного объема в местах повышенной нагрузки, особенно при сгибании подушки.
- ☰ Срок службы — не менее 1 года.
- ☰ При использовании подушки свыше срока службы возможна деформация изделия.
- ☰ Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование подушки BANANA.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Подушка TRELAX
для беременных и кормящих мам,
арт. П23, BANANA**

ТУ 8599-005-88419706-2011

Аттестация по Высшей категории качества с правом маркировки продукции знаком «Аттестат качества» сроком на 2 года № 02-04-019 от 19.06.2013 г.

Сертификат соответствия № SSAQ 001.3.2.0031, удостоверяющий систему менеджмента качества применительно к разработке и производству ортопедических изделий. Соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485:2011 «Изделия медицинские. Система менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования»



Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AB45.B.00519
(с 03.07.2013 г. по 02.07.2018 г.)

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАЦ TRELAX ДЛЯ ДЕТЕЙ

способствует правильному развитию опорно-двигательного аппарата ребенка, предупреждает развитие нарушений осанки, сколиозов. Ежедневное применение ортопедических матрацев для детей обеспечивает нормальное положение позвонков и нормализует мышечный тонус, предотвращает развитие гипертонуса мышц.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА-КОНСТРУКТОР TRELAX BABY COMFORT

обеспечивает правильное положение позвоночника ребенка во время сна и кормления, предотвращает травмы и падения. Подушка BABY COMFORT способствует правильному формированию изгибов позвоночного столба, с младенческого возраста предотвращает развитие сколиоза.

Рекомендуем



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ TRELAX ОПТИМА BABY

используется для профилактики заболеваний шеи, формирования и поддержания правильного изгиба шейного отдела позвоночника, в период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника, при повышенном тоне мышц шеи и верхней части спины (включая кривошею), в случае нестабильности позвонков шейного отдела позвоночника, при наличии признаков остеохондроза в детском и подростковом возрасте. Подушка предназначена для использования детьми с длиной надплечья от 7 до 9 см.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ ДЕТСКАЯ (ДО 1,5 ЛЕТ) TRELAX SWEET

мягко поддерживает голову и шею ребенка, уменьшает нагрузку на шейный отдел во время отдыха и сна, массирует мышцы шеи, способствует улучшению кровообращения мозга, делает сон ребенка легким и спокойным. Рекомендована для использования с 5-ти месяцев.



Производитель:
ООО «ТРЕЛАКС»

Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4

www.trelaxorto.ru