

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите насос на плоскую, жесткую поверхность или подвесьте на поручни ножного отдела кровати, используя крючки на корпусе насоса.
2. Убедитесь, что отверстие воздушного фильтра (5) не загорожено
3. Противопротлежный матрас расстелите на матрас кровати, загнув свободные концы под него. Вход для соединительных трубок должен быть расположен в ножном отделе кровати.
4. Подсоедините насос с матрасом с помощью трубок.
5. Убедитесь, что трубки не закручены и не проходят под матрасом.
6. Подключите насос к электросети.
7. Включите насос (положение «ON»). Воздух начнет поступать в матрас. Рекомендуем установить ручку регулятора давления в положение «FIRM». При этом загорится желтая лампочка, когда давление достигнет нужного уровня, лампочка погаснет и загорится зеленая.
8. Застелите матрас хлопковой простыней, и уложите пациента.
9. Отрегулируйте давление, выбрав соответственно «FIRM» или «SOFT» в зависимости от веса пациента и комфортности. Оптимальный вариант — когда между телом пациента и не наддутой частью матраса проходят два пальца руки.
10. Для включения статической функции (модели 250 EL и 418EL) установите кнопку 7 в положение «ON», при этом все ячейки надуваются одновременно, обеспечивая статическую поверхность матраса, что позволяет с легкостью менять положение пациента при проведении процедур или кормление.
11. При выключении статической функции (кнопка 7 в положении «Off» система работает в обычном (переменном) режиме

ВНИМАНИЕ: РЕЖИМ РАБОТЫ НАСОСА — КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

УХОД ЗА СИСТЕМОЙ

Насос

Проверяйте воздушный фильтр 1 раз месяц. В случае загрязнения помойте фильтр мягким моющим средством, высушите и установите на место.

Корпус насоса протирайте тканью, смоченной 25% раствором нашатырного спирта.

Матрас

Во избежание проколов избегайте контактов матраса с колюще-режущими предметами

Гигиеническую обработку производить мыльным или дезинфицирующим раствором.

Покрывало матраса 418 серии можно мыть в стиральной машине при температуре 35°C.

Сушить в месте, защищенном от солнца.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Недостаточное надувание

1. Установите переключатель давления на FIRM.
2. Исключите загиб или сдавливание трубок.
3. Убедитесь, что клапан экстренного сброса воздуха закрыт (серия 418).

Слабый поток продувания

1. Проверьте воздушный фильтр.
2. В случае загрязнения — промойте.

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ **ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ**

Модели: 250E / EASY AIR
250EL / EASY AIR



Модели: 418E / EASY AIR
418EL / EASY AIR





ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, ознакомьтесь с простыми правилами техники безопасности использования электрического устройства (насоса). Нарушение этих правил может быть опасным.

- Используйте устройство строго по инструкции!
- Всегда отключайте устройство от электрической сети, если оно не используется!
- Не оставляете прибор во включенном состоянии без присмотра!
- Оберегайте прибор от попадания влаги. Если это произошло — отключите немедленно от электрической сети!
- Не устанавливайте прибор рядом с нагревающимися поверхностями!
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия и трубки!
- Не используйте насос на открытом воздухе. Не используйте насос в помещениях с легковоспламеняющимися и химическими веществами.
- Никогда не разбирайте устройство! Все работы по ремонту и обслуживанию насоса должны проводить только квалифицированные специалисты.

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос

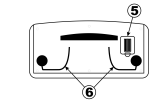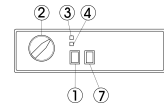

1. Кнопка включения.
2. Регулятор давления.
FIRM – жесткий
SOFT – мягкий
3. Индикатор нормального давления (зеленая лампочка).
4. Индикатор пониженного давления (желтая лампочка).
5. Воздушный фильтр.
6. Крючки для подвешивания.
7. Кнопка статической функции (только для моделей 250EL и 418EL)

Технические характеристики

- Питание: 230В, 50 Гц.
- Давление: 30-80 мм Рт.ст.
- Продолжительность цикла: 12 минут
- Габариты: 26х13х8 см.
- Масса: 1,5 кг.
- Гарантийный срок: 12 месяцев

Матрас

	Модель	Матрас						Статическая функция	Гарантия		Мак. нагрузка	Пролегни (степень)
		Ячейки	Вентиляционные микронасечки	Клапаны Экстренного Сброса воздуха	Бактериостатическое покрывало	Состав	Размеры		Матрас	Насос		
	250E	Куполообразные				ПВХ	198х89х6,3		6 мес	12мес	100кг	Средняя
	250EL	Куполообразные	+			ПВХ	198х89х6,3	+	6 мес	12мес	100кг	Средняя
	418E	Трубчатые		+	+	Нейлон /ПВХ	189х80х12.7		12 мес	12мес	120кг	Высокая
	418EL	трубчатые	+	+	+	Нейлон /ПВХ	189х80х12.7	+	12мес	12мес	120кг	Высокая

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом!
Противопрлежневые системы предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска (см. таблицу) у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Система оказывает положительное влияние на пациентов с функциональными расстройствами нервной системы (астено-невротический синдром, истерическое и депрессивное состояние), отмечается успокаивающий и релаксирующий эффекты.

Противопоказания:

- при шейных и скелетных вытяжениях,
- при нестабильных травмах спинного мозга.

О ПРОДУКЦИИ

Противопрлежневые системы являются продукцией высокого качества, просты в использовании и могут быть использованы как в домашних, так и клинических условиях, обеспечивая непрерывный 24-часовой уход за пациентами.

Матрас обеспечивает пациенту опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер, плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла 12 мин. При этом улучшается кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивается питание и насыщение тканей кислородом, предотвращая образование пролежней или ускоряя процесс заживления пораженных участков.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В противопрлежневую систему входит:

Насос: Компактный и бесшумный, с ручным управлением опорным давлением, снабженный встроенным воздушным фильтром, крючками для подвешивания к поручням кровати и сигнализацией низкого давления в системе.

Матрас: Изготовлен из нетоксичного, гипоаллергенного материала, обеспечивающего гигиеничность и простоту обработки.

Соединительные трубки.

Ремкомплект (модели серии 250E и 250EL) для самостоятельного ремонта матраса (в случае возникновения мелких проколов в следствии неосторожного обращения)