



**Инструкция по использованию матраса массажного надувного
М 0002, М 0003, М 0021, М 0022**

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ эффект


- ✓ препятствует застою крови и лимфы в тканях, обеспечивает их нормальное питание и дыхание
- ✓ предотвращает образование пролежней, сглаживая неровности спального места
- ✓ обеспечивает массажный эффект за счет попеременного надувания соседних секций

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Пролежни являются серьезной проблемой для прикованных к постели пациентов, особенно для тех, кто не может поворачиваться. Из-за долгого контакта с поверхностью кровати, кожа начинает воспаляться и этот процесс развивается. Язва причиняет серьезную боль пациенту помимо основного заболевания, таким образом, уход за пациентом становится намного тяжелее.

Стандартный массажный матрас для профилактики пролежней несет в себе предохранительную функцию. Его основная цель уменьшить давление тела на кровать. Массажная система состоит из воздушных подушек. Они поочередно накачиваются, образуя 2 группы А и В, и, соответственно, меняют точки давления тела.

Рисунок 1

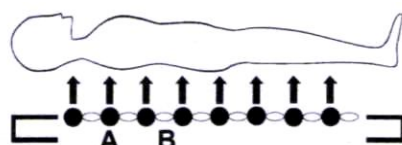

Группа А наполнена воздухом, в
это время группа В - пустая

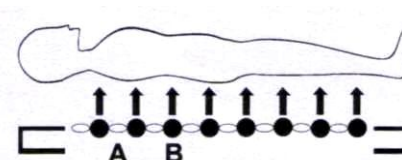

Группа В наполнена воздухом, в
это время группа А - пустая

ИНСТРУКЦИЯ

1. Установите компрессор на ровное место у ног больного или подвесьте за крюк;
2. Положите противопролежневый матрас на постель;
3. Соедините насос и матрас входящими в комплект трубками;
4. Подготовьте кровать ко сну, как вы делаете обычно, накройте матрас простыней большего размера. Не используйте булавки, так как они могут проткнуть поверхность воздушной подушки. **ВНИМАНИЕ:** проверьте трубки, убедитесь, что поток воздуха поступает непрерывно;
5. Матрас должен лежать вверх стороной наполненной воздухом. По всей поверхности матрас имеет микроотверстия (только для моделей М 0021 и М 0022), выполненные лазером, предназначенные для вентиляции, охлаждения и подсушивания тела пациента. Вентиляция не будет работать эффективно, если матрас расположен микроотверстиями к основанию кровати;
6. Для использования матраса в постели, сделанной из жестких материалов, необходимо подстелить под него легкое одеяло;
7. Установите выключатель давления на компрессоре до максимума (кроме модели М 0002). Включите вилку в розетку. Включите компрессор. Зеленая лампочка будет гореть, пока прибор находится во включенном состоянии;
8. Отрегулируйте переключатель давления (кроме модели М 0002). Регулируйте мощность работы компрессора в соответствии с весом пациента;

Вес	Мощность компрессора
Менее 50 кг	1-3
От 50 до 55 кг	4-5
От 56 до 65 кг	7-8
От 66 до 80 кг	9
Свыше 81 кг	10

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Типы поломок		Проблемы	Методы починки
Матрас не накачивается	Индикатор включен	Отсоединена трубка	Присоединить ее
		Матрас проколот	Заклейте дыру
	Индикатор выключен	Не подключено питание	Подключите питание
		Перегорел предохранитель	Замените его
Матрас надувается не полностью	Матрац очень мягкий	Давление минимально	Поверните диск направо
		Матрац трещит	Разверните его и вымойте

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Перед тем, как убирать изделие на хранение:

1. Включите компрессор и проверьте поток воздуха (воздух должен выходить из трубок попеременно каждые 5-6 минут);
2. Проверьте трубки для воздуха на наличие повреждений;
3. Если изделие функционирует нормально, сверните трубки свободно (чтобы они не согнулись и не повредились) и храните вместе с изделием в полиэтиленовом пакете, чтобы защитить от влаги и пыли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не использовать в присутствии тлеющего или открытого огня! Прежде, чем перемещать или ремонтировать насос отключите его от сети!

1. Матрас должен находиться на сухом месте. Избегайте попадания пыли и воды.
2. Избегайте прямого попадания солнечных лучей.
3. Перед тем как мыть матрас его необходимо надуть. Дезинфицирующее средство не должно содержать красители. Пожалуйста, используйте в качестве антисептика 75% спирт.

ГАРАНТИЯ

При правильном использовании предоставляется гарантия (с даты продажи) на:

- компрессор -12 месяцев;
- воздушную подушку с ячейками - 6 месяцев;
- воздушную подушку трубочного типа -12 месяцев.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Матрас воздушный-1 шт.
2. Компрессор -1 шт.
3. Комплект для ремонта для М 0002 и М 0003 (клей и две заплаты)
4. Чехол (для модели М 0022)
5. Два запасных баллона (для моделей М 0021 и М 0022)

КОМПРЕССОР С РЕГУЛИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ



Напряжение 220 В/50Гц
Давление 800 Па
Цикл 6 минут
Вес 1,5 кг