



Насадки на унитаз
10528, 10528А, 10528А/Т,
10527L, 10545, 10540



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	5
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	5
2.1 Важные предупреждения.....	5
2.2 Руководство по сборке.....	5
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	6
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	8

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик насадок на унитаз 10528; 10528А; 10528А/Т; 10527L; 10545; 10540.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Насадки на унитаз, увеличивая высоту санитарного устройства, облегчают пользование туалетом людям после перенесенных травм, операций, а также инвалидам разных категорий. Насадки увеличивают высоту унитаза, что способствует оптимальному положению пациента и обеспечивают ему комфорт. Насадки выполнены из белого прочного и легко моющегося полиэтилена. Они подходят на унитазы любой формы и не требуют специального инструмента.

1.2 Технические характеристики

Модель (артикул)	10528А	10528	10528А/Т	10527L	10545	10540
Максимальная нагрузка, кг	115	115	115	115	115	100
Масса, кг	2,7	2	1,4	1,4	1,6	4,0
Увеличение высоты унитаза, см	12	12	12	12	8-12	
Материал	гигиенический, ударопрочный пластик	гигиенический, ударопрочный пластик	гигиенический, ударопрочный пластик	гигиенический, ударопрочный пластик	гигиенический, ударопрочный пластик	анодированный алюминий

Модель (артикул)	10528A	10528	10528A/T	10527L	10545	10540
Габариты, см (ШхГ)	53x41	41x41	34x40	35x39	38x40 см (внешние) 22x24 см (внутренние)	Высота: 61-79 см ширина/глубина: 46-54x43 см
Особенности	Съемные ручки		Съемные алюминиевые поручни с мягкими валиками, увеличенное расстояние между поручнями	Крышка	Защита от брызг, возможность регулировки по высоте	Регулируемое расстояние между поручнями, регулируемая высота поручней

1.3 Упаковка

В комплектации: Насадка на унитаз, поручни (кроме моделей 10545, 10527L, 10528), винты (только с моделью 10528А/Т), крепежные элементы (только с моделью 10540).

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.

2.2 Руководство по сборке.

Модель 10540.

Внимание: измерьте параметры Вашего унитаза и отрегулируйте ножки по ширине так, чтобы они подходили к Вашему унитазу.

Для установки поручней снимите с унитаза сиденье с крышкой.

1) Деталь №1 зафиксируйте к корпусу унитаза крепежными элементами сиденья.



Деталь №1

2) Посредством кнопочного замка на ножках совместите поручни с отверстиями детали №1 до щелчка, два положения замка позволяют регулировать ширину поручней.

3) Посредством кнопочного замка на телескопических ножках отрегулируйте высоту поручней.

Модель 10528А/Т.

Прикрепите поручни к нижней части насадки на туалет с помощью винтов.

Модель 10528А.

Посредством кнопочного замка совместите поручни с отверстиями насадки на туалет до щелчка.

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте изделие на наличие трещин и поломок.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Насадки на унитаз 10528; 10528А; 10528А/Т; 10527L; 10545; 10540.
Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15
по 18
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90;
www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.



Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

**Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	
ООО «СИМС-2»	
<small>(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)</small>	
Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москва	
Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012	
<small>(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)</small>	
ИНН 7734197385	
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6	
тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru	
<small>(адрес, телефон, факс)</small>	
в лице	Генерального директора Бадаляна Саргиса Павели
	<small>(Фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)</small>
заявляет, что	Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами - НАСАДКИ НА УНИТАЗ: АРТ. 10527, АРТ. 10527L, АРТ. 10528, АРТ. 10528А, АРТ. 10528А/Т, АРТ. 10529, АРТ. 10530, АРТ. 10540, АРТ. 10545
Изготовитель продукции: VALENTINE INTERNATIONAL LTD (ВАЛЕНТАЙН ИНТЕРНЕЙШЛ ЛТД), 8TH FLOOR, No 149, Sec. 2, Ta TUNG Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien, Тайвань (Китай)	
ЗАВОДЫ:	
- ZHONGSHAN GENTRY HARDWARE PRODUCTS CO. LTD., №152 WU FU ROAD, HSEIN YIN INDUSTRIAL AREA, TAINAN HSIEN, CHINA (КИТАЙ)	
- ST. YORK ENTERPRISE CO., LTD, №12, LANE 300, GUANGDE RD, TAIPING CITY, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (КИТАЙ)	
- FOSHAN NANHAI R. POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD, NEW CITY DISTRICT. DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (КИТАЙ)	
- Nova Orthopedic & Rehabilitation Appliance, Inc., №1096, Feng Chou Road, Shi Chou Village, Sheng Kang Township, Taichung Country, Taiwan, China.	
Код ОК 005 (ОКП) 94 5100 Код ТН ВЭД СНГ 3922 20 000 0	
<small>(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)</small>	
Серийный выпуск	
<small>(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))</small>	
соответствует требованиям	ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 51632-2000
<small>(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)</small>	
Декларация принята на основании протоколов испытаний: № 1700.014 от 20.05.2014 ИЛ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России (№ РОСС RU.0001.21ИМ33); № 1131/14 от 16.05.2014 ИЦП ООО "ПСА" (РОСС RU.0001.21ИМ54)	
регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/09869 от 21.06.2011	
<small>(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)</small>	
Дата принятия декларации	09.06.2014 Декларация о соответствии действительна до 08.06.2019
	С.П.Бадалян
	<small>(Инициалы, фамилия)</small>
Сведения о регистрации декларации о соответствии	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)	
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.	
141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29	
Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc@anogemc.ru	
<small>(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)</small>	
№ РОСС ТМ.МЕ77.Д00346 от 09.06.2014	
<small>(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)</small>	
	Д.А.Дружинин
	<small>(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)</small>

Для заметок