

VENOTEKS®

T H E R A P Y

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Клинически доказанный противоэмболический эффект за счет снижения риска развития тромбоза глубоких вен.
- Трикотаж легко надевать и снимать, нескользящая резинка на силиконовой основе позволяет чулкам постоянно находиться в правильном положении на ноге.
- Ткань не образует складок, ее пористая структура позволяет коже дышать, гипоаллергенность обеспечивается использованием технологий производства изделий без латекса и хлорсодержащих компонентов.
- Отверстие в подошвенной части изделия обеспечивает возможность контроля за состоянием кожных покровов и ногтевого ложа при проведении операции, позволяет осуществлять уход за кожей пальцев ног у лежачих больных.
- Цветовая кодировка размера в пяточной части изделия способствует правильному и быстрому подбору.


ПРАВИЛА ПОДБОРА РАЗМЕРА VENOTEKS HOSPITAL ANTIEMBOLISM

Обратите внимание!

При подборе размера гольфов и чулок руководствуйтесь приведенными здесь схемами и таблицей подбора размеров.

Измерения нужно проводить утром до появления отеков на ногах или днем после обязательного отдыха в течение 15 минут с приподнятыми ногами.

- b** – окружность лодыжки
- d** – окружность на 2 см ниже коленной чашечки
- g** – окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки
- A-D** – длина от уровня d до пятки
- A-G** – длина от уровня g до пятки

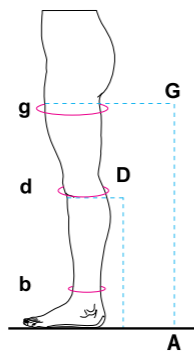

КОМПРЕССИЯ

Максимальная компрессия в области лодыжек – 18-20 мм рт.ст.

СОСТАВ

82% нейлон, 18% эластан.

Таблица подбора размеров

Противоэмболические гольфы, чулки, чулки с поясом и чулки со вставкой для широкого бедра, арт.: 1A100, 1A210, 1A211, 1A212 (размеры в см)

Размер	S	M	L	XL
b – окружность лодыжки	18-22	22-26	26-29	29-32
d – окружность на 2 см ниже коленной чашечки	29-35	34-40	39-45	44-51
g – окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки	43-54	48-60	54-66	60-72
g (только для арт. 1A212) – окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки	45-60	53-68	61-76	69-84
A-D – длина для гольфов	38-43	38-43	38-43	38-43
A-G – длина для чулок	70-80	70-80	70-80	70-80
Цветовая кодировка размера	коричневый	красный	синий	желтый

ПРАВИЛА УХОДА

Противоэмболические чулки рекомендуется стирать через день вручную или в стиральной машине (не более 15 стирок). Противоэмболические чулки можно подвергать стерилизации методом автоклавирувания при 121°C (не более 3 раз).

Ручная стирка: используйте средства для стирки деликатных тканей. Тщательно прополоскайте. Не выкручивайте. Сушите при комнатной температуре.

Машинная стирка: максимальная температура 90°C с использованием нейтральных моющих средств. Стирайте в защитном мешочке для белья. Барабанная сушка при температуре не выше 55°C.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Запрещены: отбеливание, химчистка, утюжка, сушка на нагревательных приборах.

Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.



Паровая стерилизация при 121°C

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Госпитальный трикотаж VENOTEKS THERAPY — современное и эффективное средство для профилактики образования венозных тромбов и возникновения тромбоэмболии (закупорки) артериальных сосудов внутренних органов.

Применение госпитального трикотажа VENOTEKS THERAPY обеспечивает сужение просвета вен, восстановление работы клапанов вен нижних конечностей, ускорение венозного кровотока по направлению к сердцу за счет градуированного давления (компрессии) 18-20 мм рт.ст. на мягкие ткани и стенки вен ног. Градуированная компрессия — физиологически распределенное давление по ноге, максимальное в области лодыжки и постепенно уменьшающееся к бедру, которое задается компьютером при изготовлении трикотажа VENOTEKS THERAPY.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Роды и послеродовой период в роддоме.
- Все виды амбулаторных и стационарных оперативных вмешательств.
- Пребывание больного в отделении интенсивной терапии и реанимации.
- Длительная неподвижность больного на постельном режиме (состояние после инсультов, инфарктов, ожогов, переломов шейки бедра и других травм).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Компрессионный трикотаж следует применять с разрешения лечащего врача в следующих случаях: дерматиты различного происхождения, нарушение артериального кровообращения ног (эндартериит, атеросклероз, диабет), пролежни на ногах, мокнущие экземы, острая инфекция мягких тканей ноги, в т.ч. рожистое воспаление, инфицированные трофические язвы, метаболические отеки, сердечно-легочная недостаточность в стадии декомпенсации.

Пациентам с измерениями, превышающими окружности, указанные в таблице подбора размера, не рекомендуется использовать противоэмболические чулки и гольфы.

Производитель

Рехард Технолджис ГмБХ, Потсдамер штрассе, 92, Д-10785, Берлин, Германия.

Сертификат качества ISO 13485:2003



Импортер

000 «Орто Медикл Групп», Россия, 127220, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.

Для корреспонденции

Россия, 127220, Москва, а/я № 60.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13480 от 26.12.2012 г.

выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01342 (с 27.12.2012 г. по 26.12.2015 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИНАМШ».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Сохраните кассовый чек и упаковку изделия после покупки. Индивидуальные параметры покупателя.

К внешнему виду и подбору размера изделия претензий не имею.

Дата покупки

Подпись покупателя

VENOTEKS®

T H E R A P Y

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОЭМБОЛИЧЕСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗОНЫ КОМПРЕССИИ:

- 40 %
- 70 %
- 100 %



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На компрессионные свойства госпитального трикотажа VENOTEKS THERAPY 1 месяц при условии соблюдения «Правил ухода».

СРОК СЛУЖБЫ

Не определен и зависит от интенсивности эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Компрессионное изделие, инструкция.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация с бытовым мусором.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.



ваша победа над варикозом

VENOTEKS®

T H E R A P Y

Изделия компрессионные: чулки противоэмболические

18 - 20
мм рт.ст.

hospital
antiembolism

Арт.: TVHAERent-102_06/13

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Госпитальный трикотаж VENOTEKS THERAPY нужно надевать перед операцией или родами и использовать в течение всего времени пребывания в стационаре, если врач не рекомендовал иной режим применения трикотажа. Надевать компрессионный трикотаж следует по возможности утром или после 10-15-минутного отдыха ног на возвышении для предупреждения образования отеков. Пациентам, находящимся на длительном постельном режиме, госпитальный трикотаж необходимо использовать в дневные и ночные часы и снимать его только для проведения гигиенических процедур.


ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ




- Внимательно прочитайте раздел о подготовке рук и ног к надеванию чулок.
- Выверните чулок наизнанку до пятки.



- Осторожно натяните чулок на ступню и убедитесь, что пятка чулка правильно расположена на ноге.

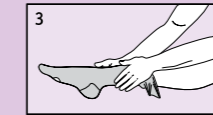

- Натягивайте чулок разглаживающими движениями через лодыжку к колену, растягивая каждый участок. Не следует тянуть чулок с усилием за верхний край.

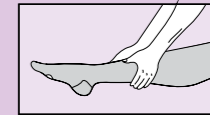

- Окончательно разгладьте мелкие морщинки по всей длине чулка.
- Если Вы надеваете чулки с поясом, натягивайте их далее на бедра.

Обратите внимание!

- Острые ногти, мозоли, заусенцы на пальцах могут повредить чулки, поэтому, используя медицинские компрессионные изделия, нужно постоянно ухаживать за ногтями и кожей кистей и стоп.
- Перед надеванием и стиркой медицинских чулок нужно снимать кольца, браслеты и другие украшения на руках, которые могут повредить изделие.
- Рекомендуется надевать чулки в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать складки.
- Для того чтобы чулки правильно «сидели» на ноге, следует сначала надеть пятку, а потом уже все изделие.

КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ VENOTEKS THERAPY

- Удалите с рук все украшения и наденьте резиновые перчатки.
- Возьмите изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению к стопе.
- Сначала снимите пятку и далее все изделие.